

マイナスイオン洗剤

ニッカクリア R50

界面活性剤ゼロ = 無発泡洗浄

医療器具等に付着した血液・タンパク質・油脂などの汚染物を瞬時に
落とし人体や環境にも優しい次世代の三次元洗剤です。



メリット

① マイナスイオン効果による三次元洗浄

マイクロバブルで浸透力が高く、隙間の汚れにも効果的に働きます。マイナスイオンの作用で汚れを分離・分解します。界面活性作用で油脂やタンパク質を分解します。


② 環境にやさしい

界面活性剤・環境ホルモン・毒性化学物質・有機溶剤を含んでいません。洗浄後は水に戻ります。(義歯等の洗浄にも使用できます)

③ 高機能・低コスト

様々な汚染物質に対し、強い洗浄力を発揮します。表面保護・防錆・帯電防止効果があります。洗浄剤の一本化で洗浄コストの削減にもなります。

■ マイナスイオンによる洗浄効果のイメージ図

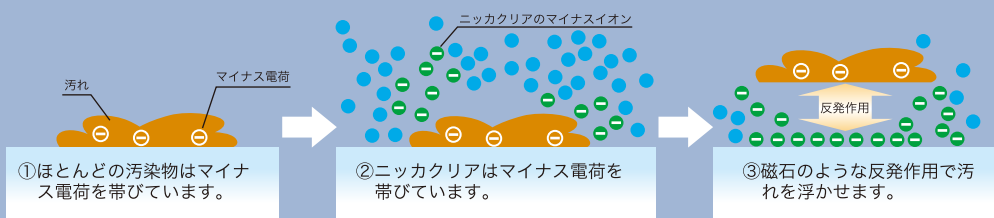

浸漬洗浄



超音波
洗浄



スプレー

使用手順




浸漬洗浄

推奨希釈倍率 約**50倍**

ステンレスバット、基本セット、咬合紙ホルダー、スケーラー等におすすめ



容器にニッカクリアを入れ、水道水で希釈する

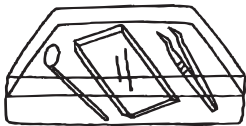

希釈したニッカクリアに器具を約15～20分ほど浸漬する
(20～60℃の温水を使用すると更に効果的)



洗浄物を取り出し水道水で十分にすすぎ、二次洗浄又は乾燥をおこない滅菌行程へ




超音波洗浄

推奨希釈倍率 約**50～100倍**

各種バー、リーマー・ファイル類、ドリル先、義歯等におすすめ



超音波洗浄器槽内にニッカクリアを入れ、水道水で希釈する

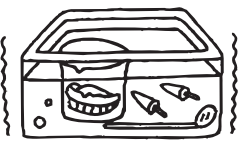

超音波洗浄器に汚れた器具等を入れ稼働させる




洗浄後、器具を取り出しすすぐ(ブラシでこすりながらすすぐと効果的)




スプレー

推奨希釈倍率 **原液～約10倍**


オペ用鋼製器具、外科用サクションチップ、また汚れのひどい場合に効果的

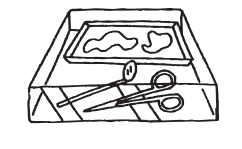

シンク又はバットなどに血液等が付着した器具を置く

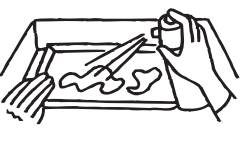

事前に用意したスプレー式容器にニッカクリアを入れて、汚れた器具に直接スプレーする

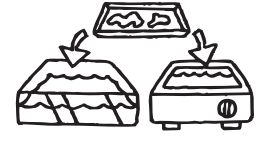

3～5分ほどおいてから浸漬洗浄又は超音波洗浄をおこなう

※ その他にウォッシャーディスインフェクター、ウォッシャーステリライザーでもご使用になれます。

ランニングコスト

(例: 1日あたり100倍希釈したニッカクリアR50を5ℓ作り使用した場合)
1日あたりニッカクリアR50を50mℓ使用 × 25日(1ヶ月の使用日数) = 1ヶ月あたり1.25ℓ (約1,719円※)

また、複数の洗浄剤を一本化する事により洗浄にかかるコストの削減を可能にします。

※4ℓ/本の場合において標準価格にて算出

製品仕様

注文番号	販売単位	標準価格
NCR-50-2KD	200mℓ×6本/箱	3,300円
NCR-50-20KD	2ℓ/本	3,000円
NCR-50-40KD	4ℓ/本	5,500円

化学名：無機質イオン溶液
液性：原液pH12.5
外観：無色透明
成分：イオン化水
炭酸ナトリウム
塩化ナトリウム(0.1%未満)
EDTA
容器：ポリエチレン容器

分析試験結果	
分析試験項目	結果
リン	検出せず
ヒ素	検出せず
鉛	検出せず
カドミウム	検出せず
総水銀	検出せず
セレン	検出せず
総クロム	検出せず
シアン	検出せず
フッ素	検出せず
ホウ素	検出せず
界面活性剤のイオン性	検出せず

- (注意事項)
- ニッカクリアR50は殺菌・消毒を目的としているものではありません。洗浄剤としてご使用ください。
 - アルミ製品は変色するおそれがございます。希釈倍率を上げてご使用ください。又PETボトルでのご使用は避けてください。
 - ウォッシャーディスインフェクター、ウォッシャーステリライザーでご使用いただく場合は機器の説明書に従ってご使用ください。
 - ニッカクリアは、食品衛生法上の規定(野菜・果実、飲食物の洗浄用に供されるもの)に基づく昭和48年4月厚生省告示第98号の規定をクリアしています。
 - 防臭剤を含んでいないため、長時間の浸け置きをおこなうと浮遊物により臭う場合がございます。
 - 上記価格は消費税を含んでおりません。

(試験依頼先)
財団法人日本食品分析センター
2008年(平成20年)1月30日
第108012111-003号・第108012111-004号

歯科発売元： **ワシエスメディカル株式会社**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-31-8
TEL. 03-3815-7671(代) FAX. 03-3815-7670
<http://www.washiesu.com>

総発売元：日科ミクロン株式会社